

# Affidabilità e precisione



## **CONTACT DAY1 TORIC**

Scheda tecnica lenti a contatto toriche giornaliere

[zeiss.it/ottico](http://zeiss.it/ottico)



Seeing beyond

## CONTACT DAY1 TORIC



Lenti a contatto toriche giornaliere, facili da applicare e confortevoli tutto il giorno



### Bio Hydrogel con Algina

BioHydrogel di tipo Bi-ionico (Zwitterionico), ovvero presenta legami chimici con ioni sia a carica positiva che negativa. L'effetto è una maggiore resistenza alla contaminazione proteica.

Integra inoltre l'Algina, un estratto naturale che permette il mantenimento prolungato dell'idratazione, sia all'interno del materiale che sulla superficie della lente.

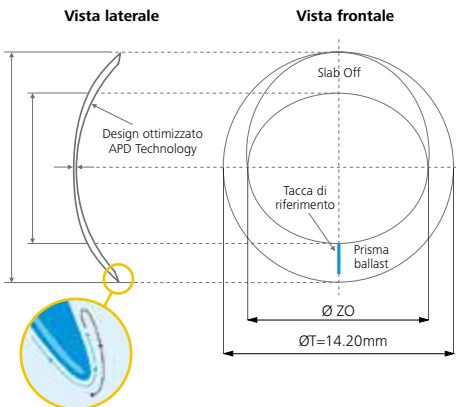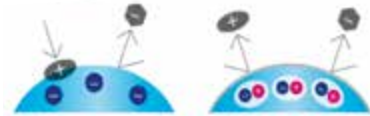

## CARATTERISTICHE TECNICE

**Slab off superiore:** assottigliamento del bordo superiore per massimizzare l'effetto ballast.

**Prisma ballast:** la parte inferiore della lente viene inspessito per ottenere l'effetto di stabilizzazione, garantendo il massimo comfort.

**APD technology:** gli spessori delle aree periferiche vengono ottimizzati in funzione dei parametri di ordine.

**Bordo a profilo gentile:** favorisce il ricambio continuo della lacrima e il movimento morbido della lente.

# TABELLA RIASSUNTIVA

<b>Geometria</b>	Torica
<b>Materiale</b>	Bio Hydrogel
<b>Dk</b>	30,0
<b>Spessore</b>	0,11
<b>Dk/t (-3,00)</b>	27,3
<b>H<sub>2</sub>O</b>	58%
<b>Protezione UV</b>	Classe II
<b>Raggio base</b>	8,8
<b>Diametro</b>	14,2
<b>Colorazione</b>	Blu
<b>Poteri sferici</b>	0,00 / -6,00 int 0,25    -6,50 / -10,00 int 0,50    +0,50 / +5,00 int 0,50
<b>Cilindri</b>	-0,75 / -1,25 / -1,75 / -2,25 (Cil. -2,25 solo 180° e solo sfere negative)
<b>Assi poteri sf. negativi</b>	10 / 20 / 70 / 90 / 110 / 160 / 170 / 180 (assi 70 e 110 solo con sfera da -6 a 0)
<b>Assi poteri sf. positivi</b>	20 / 90 / 160 / 180
<b>Stabilizzazione</b>	Prisma Ballast + Slab Off
<b>Pack</b>	32 pezzi

## CONSIGLI APPLICATIVI

1

### Anamnesi

- Informarsi sulle abitudini e sulle esigenze visive.
- Età del portatore.
- Prescrizione in uso (LAC o Occhiale).
- Creare il profilo visivo del portatore utilizzando la webapp il "Mio Profilo Visivo ZEISS".



2

### Refrazione

- Aggiornare la refrazione per lontano per ottenere il miglior comfort binoculare.
- Determinare il potere sferico riportando al piano corneale i poteri superiori a -4,00 D.
- Determinare il cilindro della prima lente di prova seguendo la tabella.

Sfera / Cilindro Occhiale	-0,75	-1,00	-1,25	-1,50	-1,75	-2,00	-2,25	>/-2,50
<b>Da +0,50 a +5,00</b>	-0,75	-0,75	-1,25	-1,25	-1,25	-1,75	-1,75	-1,75
<b>Da +0,00 a -4,00</b>	-0,75	-0,75	-1,25	-1,25	-1,75	-1,75	-2,25	-2,25
<b>Da -4,25 a -6,00</b>	-0,75	-0,75	-1,25	-1,25	-1,75	-1,75	-1,75	-2,25
<b>Da -6,25 a -8,00</b>	-0,75	-0,75	-1,25	-1,25	-1,25	-1,75	-1,75	-2,25
<b>Da -8,25 a -10,00</b>	-0,75	-0,75	-1,25	-1,25	-1,25	-1,75	-1,75	-1,75

3

### Applicazione

- Attendere dai 30 ai 60 minuti, per permettere la stabilizzazione del film lacrimale.
- Verificare centratura, movimento e rotazione della lente valutando la posizione della tacca inferiore.
- Determinare parametri lente definitiva, considerando sovrarefrazione e rotazione lente.

Mondo ZEISS

## CONOSCENZA E VALORI DEL BRAND

in Italia  
**710**  
persone su  
conoscono ZEISS\*

**410**  
persone su  
considerano ZEISS  
per acquisiti futuri\*

**310**  
persone su  
considerano ZEISS  
come prima scelta\*

**83%**  
delle persone  
riconoscono ZEISS  
come leader del settore\*

\* Ricerca condotta per Carl Zeiss Vision da Interactive Market Research Novembre 2023.



**Acquista su Shop on line**  
dal portale MyZEISS  
per avere la consegna gratuita

**NEW**



**Consegna 24h!**  
nel 95% dei principali e  
più richiesti parametri ottici

### Per informazioni:

Tel. 800 43.77.66 Numero Unico ZEISS  
email: ordini@zeiss.com  
Oppure il tuo Responsabile Commerciale ZEISS.

### Carl Zeiss Vision Italia Spa

Via S. e P. Mazzucchelli, 17  
21043 Castiglione Olona (VA)  
Italia

[www.zeiss.it/vision](http://www.zeiss.it/vision)

 ZEISS Vision Care

