

# Visione precisa e costante idratazione



## **EASY CONTACT ASPHERIC**

Scheda tecnica lenti a contatto asferiche  
giornaliere e mensili

[zeiss.it/ottico](http://zeiss.it/ottico)



Seeing beyond

## EASY CONTACT ASPHERIC

Lenti a contatto asferiche giornaliere e mensili con il miglior rapporto qualità/prezzo




Materiale Hydrogel

La gamma di lenti a contatto giornaliere con un ottimo rapporto qualità/prezzo, anche grazie alla protezione UV integrata.

La superficie della lente è modellata attraverso 8 curve, per massimizzare il comfort, garantire un movimento ottimale e migliorare l'acuità visiva favorendo la sensibilità al contrasto.

---

## CARATTERISTICHE TECNICHE

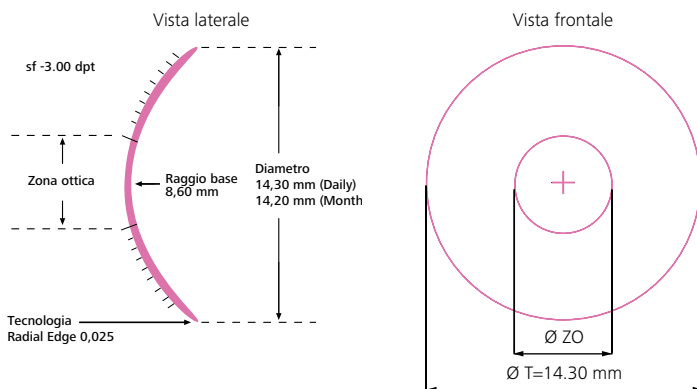

- **TECNOLOGIA RADIAL EDGE:** lo spessore della lente sulla curva periferica è stato ridotto al minimo per offrire comfort e prestazioni ottimali. Il bordo con design asferico della superficie anteriore è stato realizzato con un raggio di 0,025 mm per fornire una transizione graduale con la superficie posteriore.
- **DESIGN A 8 CURVE:** la superficie della lente è modellata attraverso 8 curve, per massimizzare il comfort e garantire un movimento ottimale sull'occhio, a vantaggio del benessere oculare.

## TABELLE RIASSUNTIVE

	DAILY	MONTHLY
<b>Materiale:</b>	Methafilcon B	Methafilcon A
<b>Dk:</b>	25	23
<b>H2O:</b>	57%	55%
<b>Protezione UV:</b>	Classe I	Classe I
<b>Raggio base:</b>	8,6	8,6
<b>Diametro:</b>	14,3	14,2
<b>Tinta di manipolazione:</b>	Azzurro	Azzurro
<b>Pack:</b>	30 / 90 pezzi	1 / 3 pezzi
<b>Spessore al centro:</b>	0,10	0,095
<b>Dk/t (-3,00):</b>	<b>27</b>	<b>25</b>
<b>Design:</b>	Asferico 8 curve	Asferico 8 curve
<b>Poteri sferici:</b>	da -12,00 a -6,50 (Step 0,50) da -6,00 a +6,00 (Step 0,25)	da -20,00 a -6,50 (Step 0,50) da -6,00 a +6,00 (Step 0,25) da +6,50 a +10,00 (Step 0,50)
<b>Codice / Classe:</b>	SC90G / 133 (conf. 30 pz) SC90H / 193 (conf. 90 pz)	S030K / 761 (conf. 1 pz) S030P / 763 (conf. 3 pz)

## CONSIGLI APPLICATIVI

1

### Anamnesi

- Informarsi sulle abitudini e sulle esigenze visive.
- Età del portatore.
- Prescrizione in uso (LAC o Occhiale).
- Creare il profilo visivo del portatore utilizzando la webapp il "Mio Profilo Visivo ZEISS".



2

### Refrazione

- Aggiornare la refrazione per lontano per ottenere il miglior comfort binoculare.
- Determinare il potere sferico riportando al piano corneale i poteri superiori a -4,00 D.

3

### Applicazione

- Ideali per qualsiasi parametro corneale.
- Attendere dai 30 ai 60 minuti, per permettere la stabilizzazione del film lacrimale.
- Verificare centratura e movimento della lente valutando anche il comfort d'uso.
- Determinare parametri lente definitiva, considerando la sovrarefrazione.

Mondo ZEISS

## CONOSCENZA E VALORI DEL BRAND

in Italia  
**710**

persone su  
conoscono ZEISS\*

**410**

persone su  
considerano ZEISS  
per acquisiti futuri\*

**310**

persone su  
considerano ZEISS  
come prima scelta\*

**83%**

delle persone  
riconoscono ZEISS  
come leader del settore\*

\* Ricerca condotta per Carl Zeiss Vision da Interactive Market Research Novembre 2023.



**Acquista su Shop on line**  
dal portale MyZEISS  
per avere la consegna gratuita

**Per informazioni:**

Tel. 800 43.77.66 Numero Unico ZEISS

email: [ordini@zeiss.com](mailto:ordini@zeiss.com)

Oppure il tuo Responsabile Commerciale ZEISS.

**Carl Zeiss Vision Italia Spa**

Via S. e P. Mazzucchelli, 17  
21043 Castiglione Olona (VA)  
Italia

[www.zeiss.it/vision](http://www.zeiss.it/vision)

 ZEISS Vision Care