

Comfort immediato e massima ossigenazione



OXY CONTACT PLUS

Scheda tecnica lenti a contatto giornaliere e mensili, asferiche e toriche

zeiss.it/vision



Seeing beyond

OXY CONTACT PLUS


Lenti a contatto asferiche e toriche,
confortevoli dal primo utilizzo



Silicone Hydrogel con Tecnologia Water Grip

Un moderno materiale silconico
caratterizzato da una particolare struttura
idrofila e da un'elevata permeabilità
all'ossigeno.


Grazie alla particolare conformazione del
macromero Innofilcon, **OXY CONTACT PLUS**
aggancia le molecole d'acqua abbassando
l'angolo di contatto e mantenendo un alto
coefficiente di lubricità.

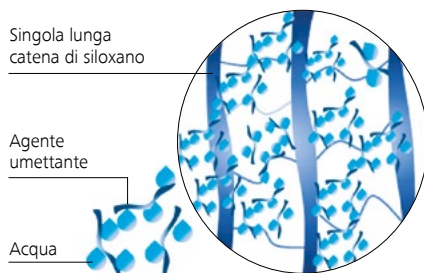

LE LENTI OXY CONTACT PLUS SONO DISPONIBILI SIA GIORNALIERE CHE MENSILI:

verifica sul Catalogo Prodotti Lenti a contatto e soluzioni ZEISS le caratteristiche e le disponibilità.

CARATTERISTICHE TECNICHE

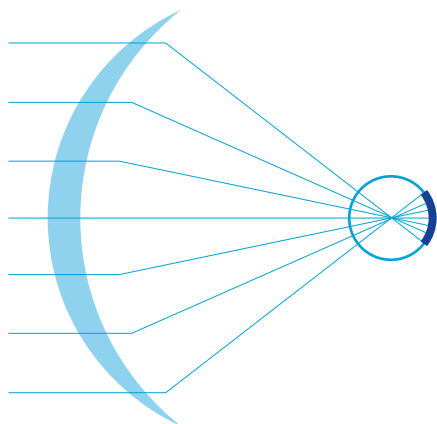

- **Asfericità HD:** grazie alla tecnologia produttiva ad alta definizione degli stampi, questa lente coniuga l'ideale curva asferica ottimizzando lo spessore e compensando le aberrazioni periferiche. Si ottiene in questo modo una maggiore profondità di fuoco e un'immagine più definita anche in condizioni di scarsa luminosità.
- La conformazione a taglio del bordo favorisce il comfort immediato e diminuisce la percezione della presenza della lente.
- La versione torica è stabilizzata grazie a un sistema a prisma Ballast.

TABELLE RIASSUNTIVE



ASFERICA giornaliera

Materiale: INNOFILCON A

Raggio base: 8,6	Dk: 70
Diametro: 14,2	H2O: 45%
Modulo di elasticità (MPA): 0,45	Tinta di manipolazione: Blu
Pack: 30 / 90 pezzi	Protezione UV: Classe I
Spessore al centro: 0,054	Dk/t (-3,00): 130
Design: Asferico HD	
Poteri sferici: da -12,00 a -6,50 (Step 0,50) / da -6,00 a +6,00 (Step 0,25) / da +6,50 a +8,00 (Step 0,50)	
Codice / Classe: SC20J / 110 (conf. 30 pz) - SC20I / 090 (conf. 90 pz)	



TORICA giornaliera

Materiale: INNOFILCON A

Raggio base: 8,6	Dk: 70
Diametro: 14,3	H2O: 45%
Modulo di elasticità (MPA): 0,45	Tinta di manipolazione: Blu
Pack: 30 pezzi	Protezione UV: Classe I
Spessore al centro: 0,091	Dk/t (-3,00): 77
Design: Torico HD (prisma Ballast)	
Poteri sferici: da -9,00 a -5,50 (Step 0,50) / da -5,00 a -1,00 (Step 0,25)	
Cilindri: da -0,75 a -1,75 (Step 0,50)	Assi: 10°, 20°, 90°, 160°, 170°, 180°
Codice / Classe: R/SC30J / 615	



ASFERICA mensile

Materiale: INNOFILCON A

Raggio base: 8,6	Dk: 88
Diametro: 14,2	H2O: 45%
Modulo di elasticità (MPA): 0,80	Tinta di manipolazione: Azzurro
Pack: 3 pezzi	Protezione UV: Classe II
Spessore al centro: 0,060	Dk/t (-3,00): 147
Design: Asferico HD	
Poteri sferici: da -12,00 a -6,50 (Step 0,50) / da -6,00 a +6,00 (Step 0,25) / da +6,50 a +8,00 (Step 0,50)	
Codice / Classe: SC600 / 815 (conf. 3 pz)	



TORICA mensile

Materiale: INNOFILCON A

Raggio base: 8,6	Dk: 88
Diametro: 14,2	H2O: 45%
Modulo di elasticità (MPA): 0,80	Tinta di manipolazione: Azzurro
Pack: 3 pezzi	Protezione UV: Classe II
Spessore al centro: 0,093	Dk/t (-3,00): 95
Design: Torico HD (prisma Ballast)	
Poteri sferici: da -12,00 a -6,50 (Step 0,50) / da -6,00 a +6,00 (Step 0,25)	
Cilindri: da -0,75 a -2,25 (Step 0,50)	Assi: da 10° a 180° (Step 10°)
Codice / Classe: R/SC700 / 715	

CONSIGLI APPLICATIVI

1

Anamnesi

- Informarsi sulle abitudini e sulle esigenze visive.
- Età del portatore.
- Prescrizione in uso (LAC o Occhiale).
- Creare il profilo visivo del portatore utilizzando la webapp il "Mio Profilo Visivo ZEISS".



2


Refrazione

- Aggiornare la refrazione per lontano per ottenere il miglior comfort binoculare.
- Determinare il potere sferico riportando al piano corneale i poteri superiori a -4,00 D.

3

Applicazione

- Attendere dai 30 ai 60 minuti per permettere la stabilizzazione del film lacrimale.
- Verificare centratura e movimento della lente valutando anche il comfort d'uso.
- Per la lente torica verificare l'asse tramite il posizionamento della tacca di riferimento.
- Determinare parametri lente definitiva, considerando la sovrarefrazione.

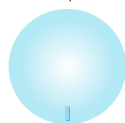

La tacca di riferimento
si trova a ore 18.



Acquista su Shop on line
dal portale MyZEISS
per avere la consegna gratuita

Per informazioni:

Tel. 800 43.77.66 - email: ordini@zeiss.com
Oppure il tuo Responsabile Commerciale ZEISS

Carl Zeiss Vision Italia Spa

Via S. e P. Mazzucchelli, 17
21043 Castiglione Olona (VA)
Italia

www.zeiss.it/vision



ZEISS Vision Care



042902128